

Indicações de Uso: Os instrumentos são utilizados em intervenções cirúrgicas tais como: odontológicas e médicas, restauração de dentes, extração de dentes, secção de dentes e raízes dentárias, bem como para exames e procedimentos ambulatoriais e clínicos.

Advertência: Todos os instrumentos devem ser limpos e esterilizados antes de cada utilização.

Manutenção e conservação

O produto apresenta-se eficaz para executar sua função determinada, portanto, ele não deve ser utilizado de forma incorreta para que sua vida útil não seja reduzida.

Condições de manipulação:

1º - Desinfecção: Os instrumentos contaminados devem passar pelo processo de descontaminação e lavagem antes de serem esterilizados. A desinfecção prévia a lavagem do instrumental deve ser feita com agente químico adequado, observando-se o tempo de imersão e a diluição da solução preconizada pelo fabricante. Sempre observar a data de validade do produto.

2º - Limpeza: A limpeza dos instrumentais tem a finalidade de reduzir a carga microbiana, a matéria orgânica e outros contaminantes por meio da remoção de sujidades e deve ser realizada manualmente, ao se aplicar ação física a superfície do instrumental. Para o procedimento pode-se utilizar esponjas ou escova de cerdas macia e detergente ou sabão neutro a 1%.

3º - Enxague: Após completar a limpeza dos instrumentais, deve-se cuidadosamente enxaguá-los em água potável e corrente.

4º - Secagem: A secagem dos instrumentais deve ser feita após a lavagem e tem por objetivo evitar a interferência da umidade no processo de esterilização e aumentar a sua eficácia.

5º - Embalagem para esterilização: Para ser esterilizado em autoclaves o material deve ser acondicionado em pacotes, os quais devem ser feitos com matérias que permitem a passagem do vapor, o mais recomendado é o papel grau cirúrgico. Portanto, antes de ser esterilizado, o material deverá ser embalado e identificado.

6º - Esterilização: A esterilização é o processo que visa destruir ou eliminar todas as formas de vida microbiana. A esterilização pode ser realizada a vapor, normalmente vapor saturado a uma temperatura de 134°C, ou ainda por autoclaves. Não recomendamos o uso de ácidos para a esterilização. Na odontologia, o processo de esterilização indicado é por meio da autoclave, mas quando essas estão desreguladas podem apresentar umidade residual a qual poderá provocar manchas e/ou corrosão. Atente-se sempre para as recomendações de uso do manual do equipamento, fornecido pelo fabricante.

⚠ ATENÇÃO: As superfícies coloridas requerem cuidado especial. Evite o contato com objetos pontiagudos, cortantes e esponjas abrasivas.

Forma de descarte: Os instrumentais cirúrgicos que tenham o uso interrompido permanentemente, por algum motivo relevante, e que não tenham objetivos de estudos e/ou análises posteriores, devem ser adequadamente descartados. Os métodos e procedimentos de descarte devem assegurar a descaracterização do instrumental, impedindo qualquer possibilidade de reutilização e são de inteira responsabilidade do comprador/ profissional.

Prazo de validade: Indeterminado.

Data de fabricação e Lote: Vide etiqueta na embalagem.

PRODUTO FORNECIDO NÃO ESTÉRIL

PRODUTO REUTILIZÁVEL

Fabricado/ Distribuído por:

Leandro Kleber Ribeiro dos Santos - ME
Rua Dona Etelvina, nº 600 - Capetinga/MG.
CNPJ: 07.130.168/0001-60
Autorização ANVISA: 8.06.323-1